











# Sonic Surgeon 600L / 310L







## **::** Оптический инструмент с LED-подсветкой





### :: Оптимизированные инструменты и наконечники





# **Крышку помпы легко установить** и закрыть в одно движение







# Характеристики продукта

#### Характеристики

#### Высокая мощность инструмента при 60 Вт

Благодаря инновационным технологиям, инструмент позволяет значительно расширить область применения аппарата и уменьшить время, необходимое на операцию.


#### Элемент с пьезоэлектрическим эффектом – технология, разработанная компанией DIT

Основываясь на пьезо технологии компании DIT, которая является ядром ультразвукового блока управления, зерия Sonic Surgeon демонстрирует стабильную и оптимальную мощность.

#### Оптимизированный дизайн инструмента и насадок


Дизайн, основанный на анализе вибраций, позволяет оптимизировать инструмент и наконечник для повышения прочности и эффективности.

Cepus Sonic Surgeon series с более стабильнымми и эффективными вибрациями помогает уменьшить дискомфорт при использовании инструмента от нагревания на протяжении хирургической операции.

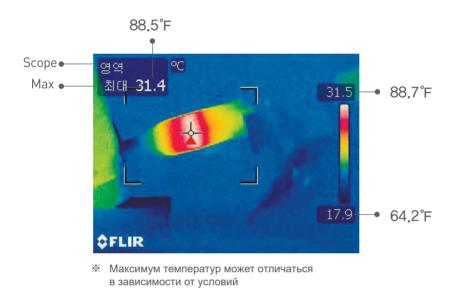

#### Съемная крышечка инструмента (CAP) и LED-лампа

Съемную крышечку инструмента легко очищать от загрязнений, что сводит к минимуму инфицирование. LED-лампу можно заменять, что позволяет сократить затраты при обслуживании инструмента.

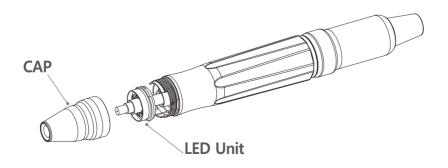

04 05

#### Оптический инструмент с LED-подсветкой

Инструмент с подсветкой позволяет лучше видеть необходимое место, тем самым повышая точность и угол обзора.

#### Приложение для сенсорного LCD-дисплея

3.2" сенсорный LCD-дисплей обладает лучшей видимостью и удобством использования в сравнении с предыдущими версиями.

#### Функция запоминания

Функция запоминания мощности и потока воды обеспечивает комфортное использование инструмента.

#### Широкий выбор насадок

19 насадок, входящих в комплект Sonic Surgeon, делают аппарат универсальным, а операции синус - лифтинга более безопасными и удобными, особенно с запатентованной крестальной насадкой.

#### Многофункциональная и эргономичная педаль

Мультифункциональная педаль контролирует включение/выключение аппарата, скорость доставки воды и мощность. Тонкий дизайн педали предотвращает затекание ноги во время операции.

#### Безопасность для пациента доказана

#### - Функция самодиагностики

Эта функция предотвращает инциденты с помощью автоматического определения неестественного полажения инструмента, помпы и насадки. В атипичных случаях, Sonic Surgeon 600L автоматически останавливает выполнение операции.

#### - Функция автоохлаждения

Для предотвращения перегрева кости, первые 10 секунд после включения инструмента вода подается без вибрации наконечника.

#### ■ Области применения

#### Имплантология

Расщепление гребня Синус - лифтинг

- Закрытый синус лифтинг
- Открытый синус лифтинг Забор аутокости

Подготовка ложа под имплантат

#### Удаление зубов

Хирургическая стоматология


Пародонтология

Челюстно-лицевая хирургия

Ортодонтия





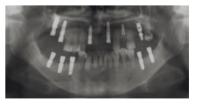



# Компоненты

#### **Ж Состав может быть изменен в зависимости от нужд покупателя и обстоятельств**

#### Генератор

#### Стильный дизайн Высокая производительность помпы

Производительность помпы до 100мл./мин. минимизирует риск перегрева кости.



#### Инструмент •

#### Стабильная, высокая мощность

Наконечник, разработанный по собственным технологиям компании, выдает наиболее стабильную, оптимальную мощность. Его легко отделить для очистки.



**600L Optic Handpiece** 



310L Optic Handpiece

#### Педаль

#### Многофункциональная педаль

Педаль позволяет включать/выключать наконечник, регулировать интенсивность работы помпы и мощность ультразвука.

#### Эргономичный дизайн Ergonomic design

Эргономичный дизайн педали предотвращает затекание ноги во время операции.



# Динамометрический ключ

(На выбор)

Динамометрический ключ используется для затягивания насадки на наконечнике.

При достижении необходимого усилия ключ проворачивается, не позволяя вам приложить чрезмерное усилие при закручивании насадки. В набор входит две единицы.



#### Насадки •

#### (На выбор)

Запатентованная насадка для закрытого синус-лифтинга. Данная насадка позволяет проводить операции с большей безопасностью и удобством.

Разнообразие входящих в комплект насадок (19 видов) позволяет проводить такие операции, как синус - лифтинг, расщепление альвеолярного гребня, забор костного блока, открытие окна, забор аутокости и др.



### Бокс для стерилизации •

Большой бокс для стерилизации, вмещающий наконечник, ключ и насадки.



### Алюминиевый чемодан

Для легкого и безопасного перемещения аппарата



# **Трубка для солевого •** раствора


Соединяет помпу и инструмент






# Применение насадок

#### ■ Стандартные насадки

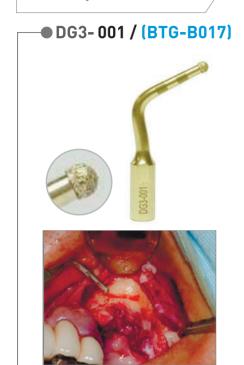

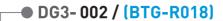



Характеристики


\* Специально изготовленная насадка с алмазным покрытием имеет большую режущую способность и более долговечна, чем ее аналоги.



- Открытие окна
- Подготовка ложа под имплантат



- \* Мощность: Normal 3
- Помпа: 3

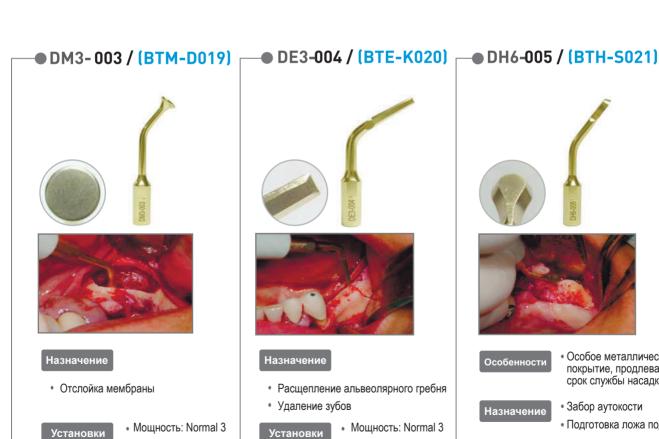

Помпа: 1

# Назначение • Расщепление альвеолярного гребня • Удаление зубов • Мощность: Normal 3 Установки Помпа: 3



Помпа: 1

08 09

#### Специальные насадки

# DD6-028i



- Специальная насадка для поднятия мембраны путем гидравлического давления позволяет сделать отверстие и заложить остеопластический материал без сверления, даже при высоте кости 5 мм и более.
- Диаметр головки 2,8 мм (внутренняя ирригация).
- Глубиномер: маркировка 4, 6, 8, 10,12 мм



\* Закрытый синус - лифтинг



- \* Мощность: Boost 3
- Помпа: 5











- Специальная насадка имеет большую режущую способность и долговечность, чем обычные насадки с алмазным покрытием.
- Диаметр головки 1,6 мм
- \* Глубиномер: маркировка 4, 6, 8, 10, 12 мм



• Открытие окна



- \* Мощность: Boost 3
- Помпа: 3









- Дополнительная боковая режущая кромка делает насадку более эффективной.
- Глубиномер: маркировка 4, 6, 8,10, 12 мм



- Открытие окна
- Расщепление альвеолярного гребня
- Забор костного блока



- Мощность : Boost 3
- Помпа: 3










 DC6-SAW L.R (BTC-I025) L (BTC-I026) R



- Дополнительная боковая режущая кромка делает насадку более эффективной.
- Используется в труднодоступных местах.

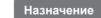

- \* Расщепление альвеолярного гребня
- Забор костного блока



- \* Мощность: Boost 3
- Помпа: 3












## Опциональные насадки

Указанные насадки могут использоваться с sonic Surgeon 310L и Sonic Surgeon 300. Некоторые насадки для Sonic Surgeon 600L несовместимы с Sonic Surgeon 310L.

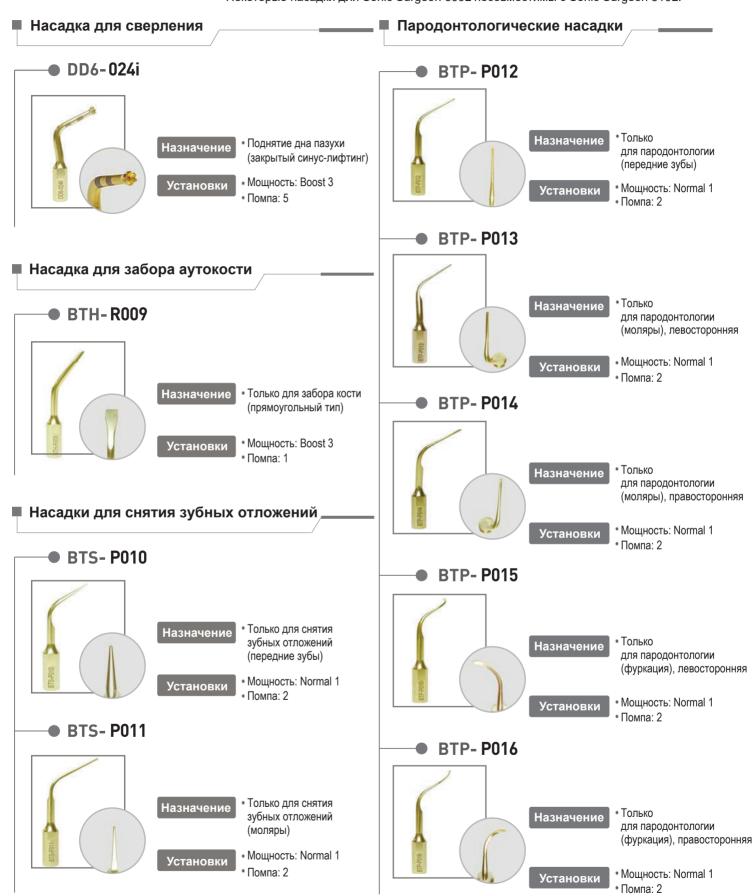

10 11

# Технические характеристики







Ultrasonic Piezo Surgery Sonic Surgeon 310L

Категория		Значение
<u>·</u>		
Устройства в соответствии с Директивой 93М2/ЕЕС		Класс IIb.
Класс в соответствии с EN 60601-1		I тип В
Устройства по импульсному режиму		60" ON 30" OFF
Необзодимая мощность	Напряжение	AC 100-240 B
	Ток	AC Max 2A
	Частота	50/60 Гц
Ультразвук	Рабочая частота	26 ± 3 кГц
Скорость доставки воды помпы		Регулируется панелью управления; от 10 до 100 мл/мин
Температура	Транспортировка и хранение	От -10°C до 70°C
	Рабочая	От 10°C до 60°C
Относительная влажность	Транспортировка и хранение	От 10% до 95%
	Рабочая	От 30% до 75%







