



EAC



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ

Руководство по эксплуатации АВЕ 630.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№TC RU C-RU.AL16.B.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015.

ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при при технических лабораторных и паяльно-монтажных работах, наладке и ремонте оборудования.

1.2 Особенности

- многофункциональный светодиодный светильник для общего освещения рабочего места зубного техника;
- адаптирован для столов СЗТ МАСТЕР;
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения плафона в горизонтальной плоскости вперед/назад с перемещением выдвижного ящика;
- светодиодная лампа с цоколем 2G11 мощностью 30 Вт, нейтральный белый цвет;
- развитая система хранения: два лотка, выдвижной ящик, полка над ящиком, подготовка для установки КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК; магниты под основанием для крепления инструментов.
- подготовка для установки точечного светильника ЛЮКС 2.1 с гибким кронштейном для локальной подсветки рабочей зоны;
- установка на горизонтальную поверхность, столешницы с использованием СТРУБЦИНА 1.1 с держателем инструмента, поставка по дополнительной заявке.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание..... ~220 В 50 Гц
- максимальная потребляемая мощность, не более74 ВА
- освещенность рабочей зоны, до 5000 лк
- цветовая температура5000 К
- габариты, не более 1155×510-760×705 мм
- масса, не более 12,0 кг
- толщина столешницы при использовании СТРУБЦИНА 1.1 до 42 мм

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 – Плафон – 1 шт
- 2 – основание с выдвижным ящиком (6) и крышкой (А)*
- 3 – Стойка-труба ($\varnothing= 25$ мм L~ 600 мм) – 2 шт
- 4 – Фальшпланка – 2 шт
- 5 – Скоба для стойки – 4 шт
- 6 – Уголок – 2 шт
- 7 – Лоток - 1 шт
- 8 – Накладка боковая - 2 шт
- 9 – Уголок декоративный – 1 шт
- 10 – Стенка задняя – 1 шт
- 11 – Кронштейн – 2 шт

Стяжка – 4 шт






Крепеж: винт М 4x20 – 8 шт; гайка-барашек М4 – 8 шт;
шайба 4 – 8 шт; саморез 3,5x9,5 – 3 шт.

Руководство по эксплуатации АВЕ 630.000.000 РЭ

☒ - Держатель лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК

☒ - поставка по дополнительной заявке

* - установлены по месту

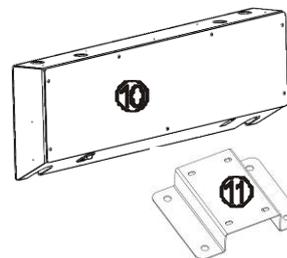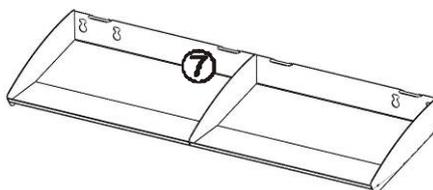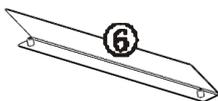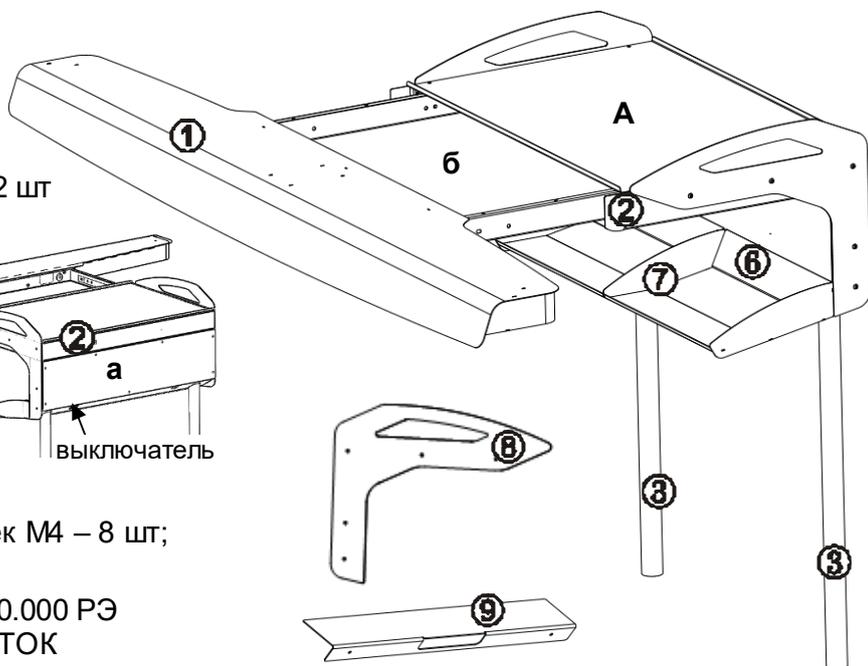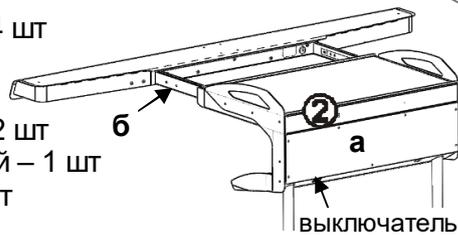

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

ВНИМАНИЕ!

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.

Выполнение работ по электромонтажу - электротехническим (электротехнологическим) персоналом, имеющим III группу электробезопасности по ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



4.2 Снять крышку (а) с задней стенки (10), крепится на 7 саморезов, верхнюю крышку (А) с основания (2) – крепится на 4 самореза. Соединить стенку заднюю и основание винтами М5x10, установленными по месту.

Установить стойки (3) на заднюю стенку (10), зафиксировав скобами. Нижние скобы одновременно фиксируют лоток (7).

4.3 Установить и закрепить плафон (1) к основанию (2), произвести монтаж проводов.



Подсоединение проводов к колодкам WAGO:

Подвязка проводов:

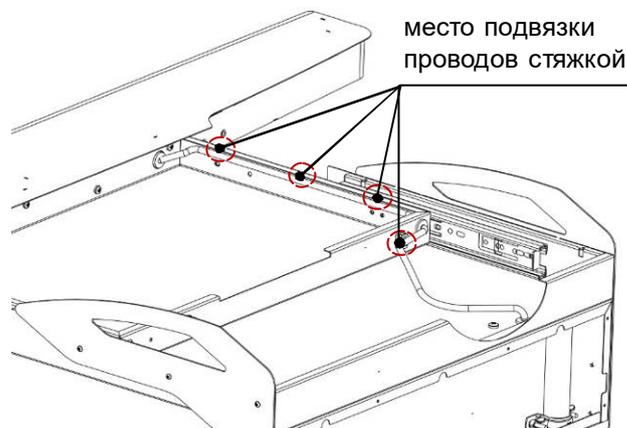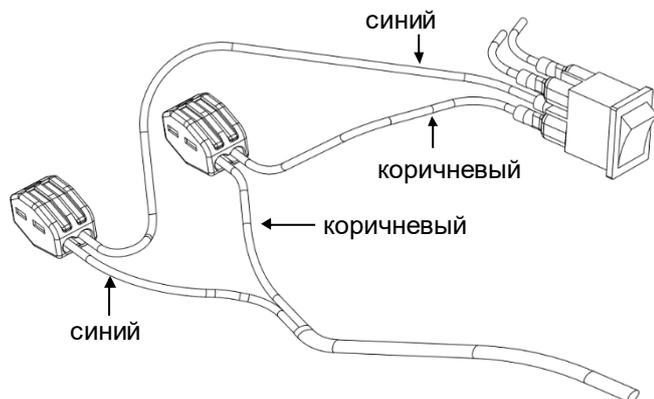

Несколькими выдвиганиями плафона с ящиком (6) – проверить наличие требуемого запаса сетевого шнура и отсутствие возможности его повреждения. При выявлении – исправить.

4.4 Установить и закрепить уголок (9) (декоративный), крышку (а), накладки боковые (8), уголки (6), крышку (А).

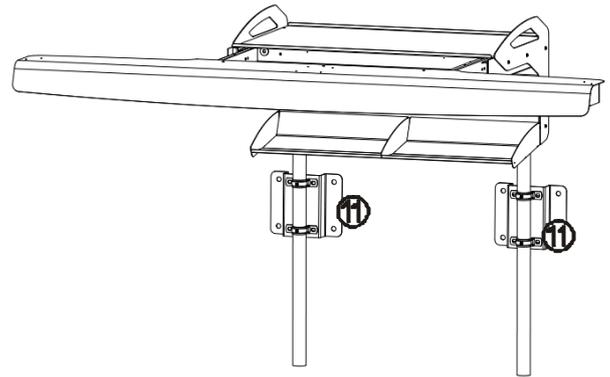
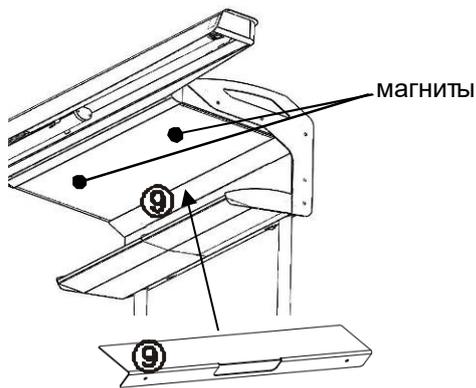


Кронштейны (11) используются для крепления к стене. Крепеж в комплект не входит.

4.5 На верхней полке СЗТ(СУЛ) удалить заглушки (при наличии).

Через фальшпанки (4) опустить стойки (3) в открывшиеся отверстия, **не защемляя сетевой шнур**.

4.6 Выставить нужное положение ЛЮКС по высоте и затянуть винты скоб (5) на задней стенке СЗТ. Максимальная высота – при совмещении нижних краев стойки и нижней скобы СЗТ.

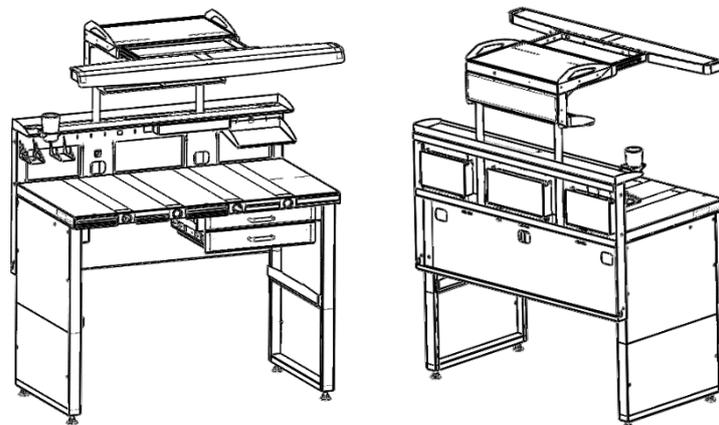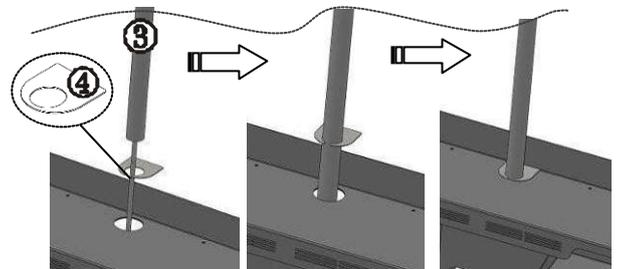

Пример установки ЛЮКС на СЗТ 4.3 МАСТЕР

5 РАБОТА

Подключить сетевую вилку ЛЮКС к источнику электропитания.


Для удобства в работе возможно крепление держателя лотков до 2-х шт. КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК.

Отключать сетевую вилку ЛЮКС от источника электропитания при длительных перерывах.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛЮКС от сети.

Замена ламп:

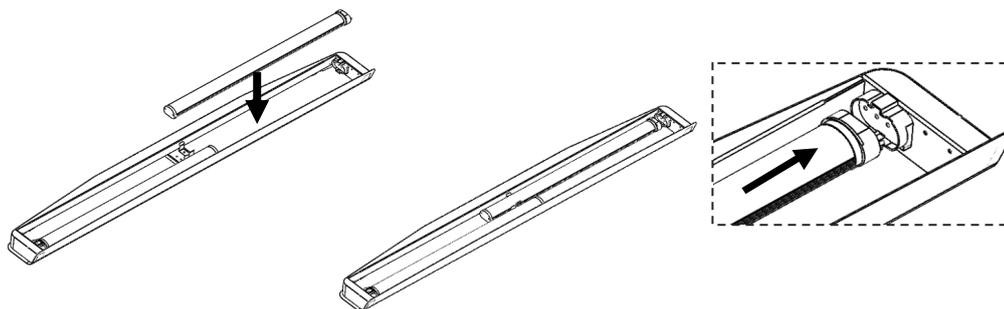

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца (для лампы – 6 месяцев) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

Исправления не допускаются

ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.