




**EAC**



# **МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серии ВМУ**

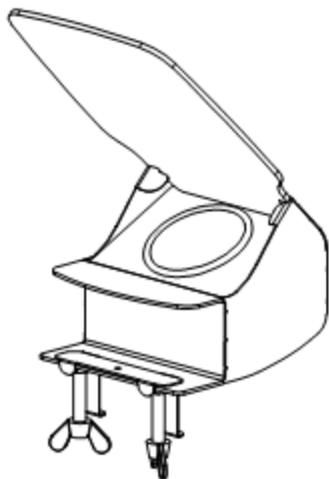

**Этикетка  
АВЕ 641.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-RU.AY04.B.21671 от 16.07.2015

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального серии ВМУ, (далее – ВМУ). ГОСТ 16371-2014.

1.2 ВМУ предназначен для фильтрации и удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов при механической обработке изделий в ортопедической стоматологии и при проведении других аналогичных работ.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

### 1.4 Основные технические характеристики

- масса, не более 0,8 кг
- габариты с экраном, не более 155×160×245 мм
- диаметр подсоединяемого шланга 44 мм
- крепление к столешнице толщиной 18...50 мм

### 1.5 Особенности

ВМУ используется совместно с Устройством пылевсасывающим зуботехническим УПЗ-Бокс-01 «Аверон» (далее - УПЗ)<sup>1</sup> при комплектовании рабочих мест.

Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

Для освещения рабочей зоны возможна установка светильника ЛЮКС 2.1 (поставка по дополнительной заявке).



## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
Корпус	- 1
Экран ЩИТ 1.0 АРТ	- 1
Фильтр-сито	- 1
Подкладка для струбицы	- 1
Втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ	- 1
Этикетка АВЕ 641.000.000 ЭТ	

Поставка по дополнительной заявке:  
Светильник ЛЮКС 2.1

## 3 КОНСТРУКЦИЯ

1 – Корпус	4 – Фильтр-сито
2 – Экран защитный	5 – Втулка резиновая
3 – Струбцина с винтами	6 – Подкладка

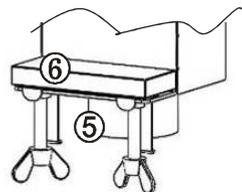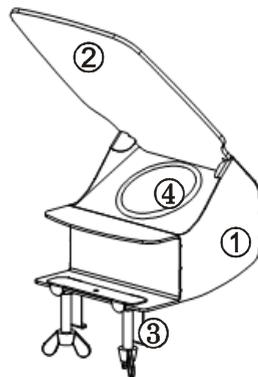

<sup>1</sup> - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Закрепить ВМУ струбциной (3) на краю столешницы.

Подсоединить входной шланг УПЗ к выходу ВМУ – через втулку (5).

Установить экран (2) в паз на корпусе ВМУ.

Для освещения рабочей зоны возможна установка светильника светодиодного ЛЮКС 2.1 (поставка по дополнительной заявке). Светильник крепится на дне ВМУ, крепежные отверстия закрыты винтами.



Подкладку (6) использовать для крепления ВМУ к тонким столешницам, толщиной менее 20 мм.

## 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистка воздушных каналов ВМУ от производственных отходов с использованием УПЗ;
- протирка внутренних, наружных поверхностей и экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

## 6 ГАРАНТИИ

**6.1** Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет.

Гарантия не распространяется на экран.

**6.2** Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

**6.3** Адрес Изготовителя:

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>ВМУ</b>	<b>1.0 АРТ</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.