

Термозапечатывающие RU устройства и медицинская упаковка Революция упаковки



Euronda®
Pro System

www.stomshop.pro

Термозапечатающие устройства и медицинская упаковка

Революция упаковки

4 **Термозапечатающие
устройства и медицинская
упаковка**
Революция упаковки

7 **Euromatic®**
Упрощает, ускоряет
и отслеживает работу

11 **Euroseal® Valida**
Термозапечатающее
устройство, валидирующее
процесс

15 **Euroseal®**
Простой и универсальный
термозапечатаватель

19 **Euroseal® Infinity**
Одно термозапечатающее
устройство навсегда

22 **Технические
характеристики**

24 **Медицинская упаковка**

25 Eurosteril® Рулоны для
Стерилизации

25 Mix Eurosteril®

26 Eurosteril® Рулоны для
Стерилизации со Складками

26 Euroseal® Check

27 Eurosteril® Пакеты для
Стерилизации

27 Eurosteril® Пакеты
для Стерилизации
Самоклеющиеся

www.stomshop.pro

Euronda Pro System

Products, Process, Protection



Чистка

Упаковка



**Термо-
дезинфекция**
Eurosafe 60



**Ультразвуковая
мойка**
Eurosonic® 4D
Eurosonic® 3D
Eurosonic® Energy
Eurosonic® Micro



**Термо-
запечатывание**
Euromatic®
Euroseal® Valida
Euroseal®
Euroseal® Infinity



**Рулоны для
стерилизации**



**Euroseal®
Check**

Euronda Pro System – это система полной защиты для стоматологической практики, разработанная для безопасности оператора, пациента, инструментов и рабочего пространства. Стерилизация - это процесс, выполняемый в несколько этапов, и его результат зависит от корректного выполнения каждого из них, от сбора до хранения. Благодаря линии Pro System возможно применение передового, эффективного и действенного протокола стерилизации, повышающего безопасность практики и оптимизирующего ее ресурсы.



Стерилизация



Автоклавы

E10
EXL
E9
E8



Контрольный
тест



Отслеживаемость/
Регистрация данных



Обработка воды


Aquaosmo
Aquabox
Aquafilter 1 to 1
Aquadist

Термозапечатающие устройства и медицинская упаковка

Революция упаковки



Целью упаковки является сохранение стерильности инструментов после процесса стерилизации. Предполагается упаковка обеззараженного, вымытого, очищенного, дезинфицированного, ополоснутого, высушенного и прошедшего контроль инструмента в специальный пакет, который будет запечатан, что позволит поместить его в автоклав и сохранить инструмент стерильным с течением времени (в соответствии со стандартами EN 11607-1 и EN 868-5). Euronda предлагает широкий ассортимент упаковочных решений и термозапечатающих машин для упрощения процесса упаковки и для обеспечения максимальной герметичности и стерильности упакованных инструментов без ошибок и задержек. Кроме того, Euroseal® Valida и Euromatic® продвигают концепции валидации, подключения и отслеживаемости Euronda Pro System.

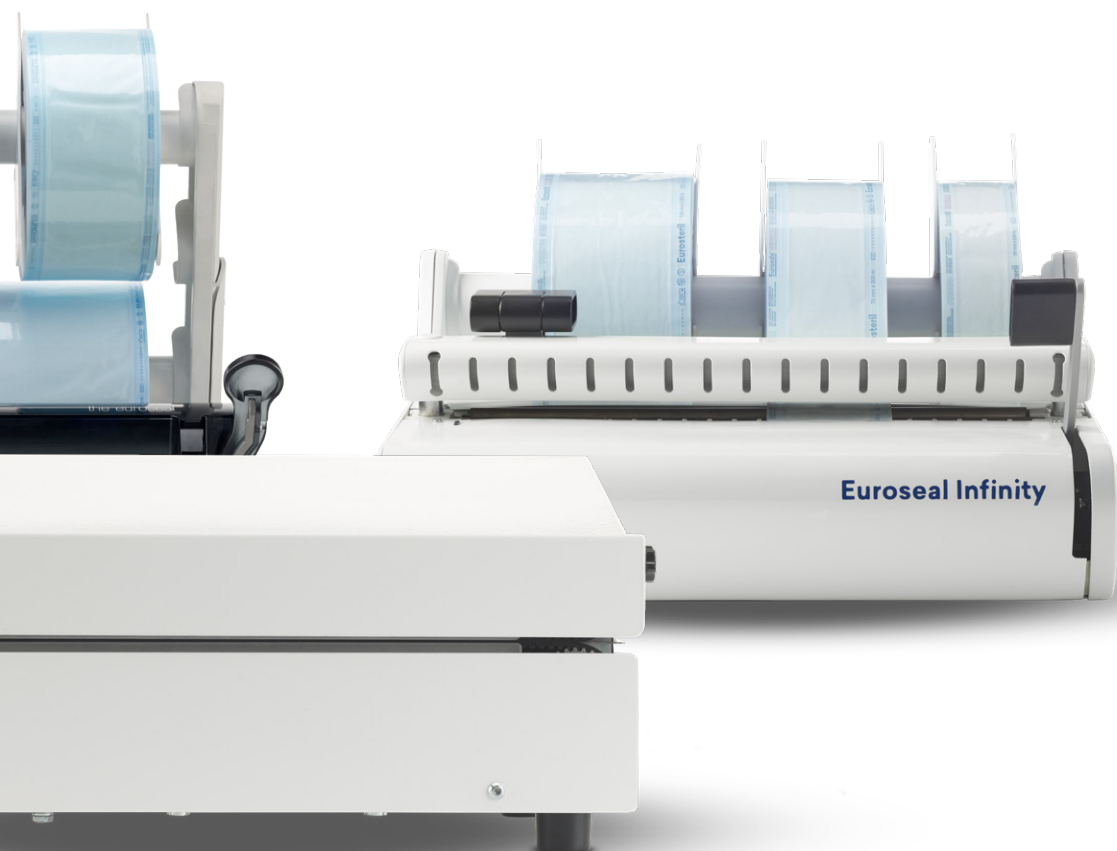

Euromatic®

Упрощает, ускоряет и отслеживает работу

Полностью обновленный дизайн и функциональность. Euromatic® - это ротационное термозапечатывающее устройство с технологией непрерывного цикла и скоростью 8 метров в минуту. Идеален для клиник с большим количеством пакетов для запечатывания. Достаточно вложить пакет, содержащий инструменты, и Euromatic® производит весь цикл автоматически до полной термозапечатки. Кроме того, встроенный принтер и новая система оптимизации картриджа позволяют печатать выбранные оператором данные непосредственно на пакете.



Полоса апечатывания:
12.5 мм



Габариты (шхвхг):
510 x 215 x 242 мм



Вес:
14 кг




Напряжение питания:
200-240 В | 50/60 Гц

**Потребляемая
мощность:**
600 Вт



**Возможности
подключения:**
Ethernet, SD-карта и USB

Помимо гарантии отличных результатов за наименьшее время, позволяет валидировать процесс и отслеживать данные процесса, сохраняя их на компьютер с помощью соединения Ethernet, или на внешнюю память, выбрав USB или SD-карту. Для идеального, быстрого, безопасного и отслеживаемого запечатывания.

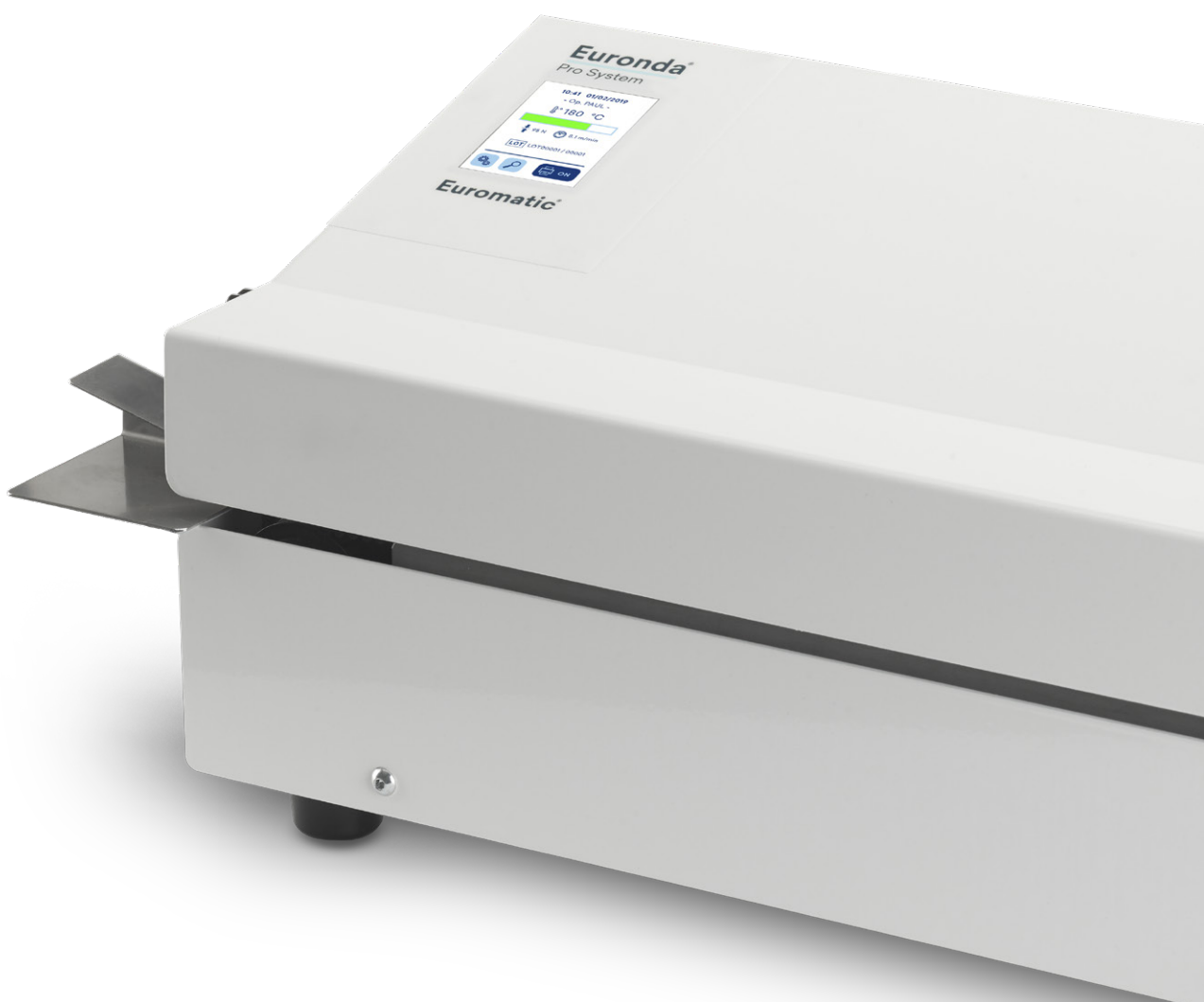



Скорость

Скорость запечатывания 8 м в минуту и запечатывание мультиполосой гарантируют прекрасные результаты за короткое время.



Надежность

Звуковой сигнал оповещает оператора в случае необходимости, а функция stand-by активируется автоматически, когда машина не используется.



Простота

Инновационный 2,8-дюймовый цветной сенсорный дисплей с новым удобным интерфейсом направляет пользователя в выборе функций меню.



Управляемость

Возможно регулировать температуру на командной панели для оптимального термозапечатывания с любым типом бумаги.



Отслеживаемость


Встроенный принтер печатает данные непосредственно на пакете. Всю информацию возможно перенести на компьютер с помощью USB, SD-карты и соединения Ethernet (в стандартной комплектации).



Аксессуары

Полная гамма аксессуаров для удобства использования, таких как стальная фронтальная скользящая поверхность, дополненная держателем рулонов с режущим устройством.


Опциональные аксессуары

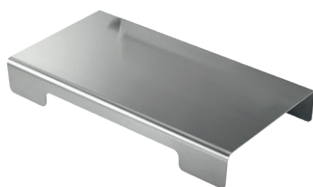


Фронтальная скользящая поверхность - Размеры (дхвхг): 480 x 60 x 240 мм



Фронтальная скользящая поверхность с роликами - Размеры (дхвхг): 790 x 66 x 289 мм

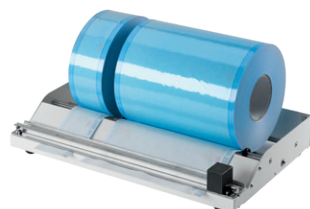

Держатель рулонов с режущим устройством - Размеры (дхвхг): 480 x 78 x 300 мм

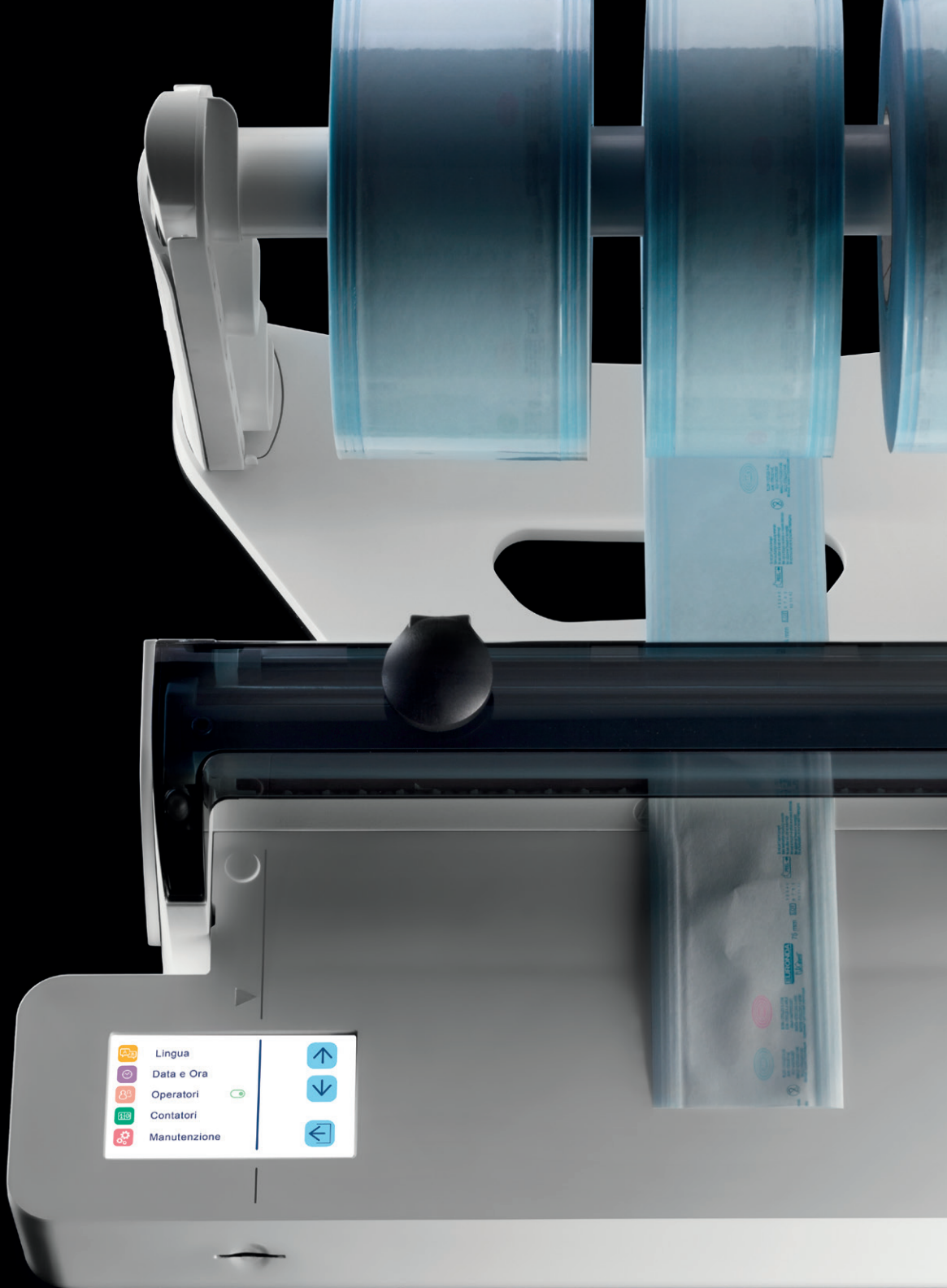

	Lingua	
	Data e Ora	
	Operatori 	
	Contatori	
	Manutenzione	

Euroseal® Valida

Термозапечатавающее устройство, валидирующее процесс

Euroseal® Valida обладает лучшими характеристиками ручного термозапечатавателя: современный эргономичный дизайн, прочность, надежность и универсальность, обеспечиваемая запатентованным держателем рулонов. Удобная опорная поверхность и прозрачная крышка из поликарбоната гарантируют исключительную простоту в использовании. Ко всему вышеперечисленному добавляется способность Euroseal® Valida валидировать цикл запечатывания, сохраняя на SD-карту данные, относящиеся к циклу, и результат произведенных операций.



Полоса апечатывания:

12 x 310 мм



Габариты (шхвхг):

- Стандарт: 500 x 315 x 490 мм

- С настенным держателем рулонов: 500 x 200 x 490 мм

- С двойным держателем рулонов: 500 x 420 x 490 мм



Вес:

8.3 кг



Напряжение питания:

200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

100 Вт



Возможности подключения:

Ethernet, SD-карта и USB

Может подключаться непосредственно к PC через Ethernet и WiFi (опционально) для немедленной передачи данных. Инновационный 4-дюймовый цветной сенсорный экран оснащен обновленным удобным для пользователя интерфейсом. Расположенный непосредственно на опорной поверхности, он дает возможность пользователю быстро и интуитивно просматривать меню, выбирая между предустановленными циклами и одним свободным циклом, позволяющим варьировать температуру для запечатывания любого типа рулона и пакета.





Отслеживаемость

Данные запечатывания могут быть перенесены непосредственно на ПК через Ethernet и WiFi (опционально).



Безопасность

Сводит к минимуму риски ошибок и травм, в полном соответствии с нормами EN 17665-1, EN 11607-2, EN 868-5.



Валидация

Валидирует цикл запечатывания, подтверждая успешный исход процедуры и сохраняя данные (время, температура, давление) на SD-карту.



Удобство для пользователя

Позволяет выбирать между предустановленными циклами и одним свободным циклом, позволяющим устанавливать температуру.



Универсальность

Запатентованный держатель рулонов, закрепляемый на стене, делает машину адаптируемой к имеющемуся пространству.



Практичность


Практичная опорная поверхность, поликарбонатная крышка, позволяющая проследить за рулоном до области запечатывания, и перенесенное для большей эргономики гнездо LAN.




Новый 4-дюймовый цветной сенсорный дисплей



Улучшенное положение гнезда Ethernet

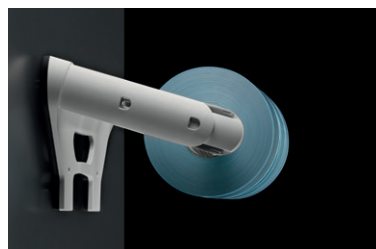

Настенный держатель рулонов, оптимизирующий пространство

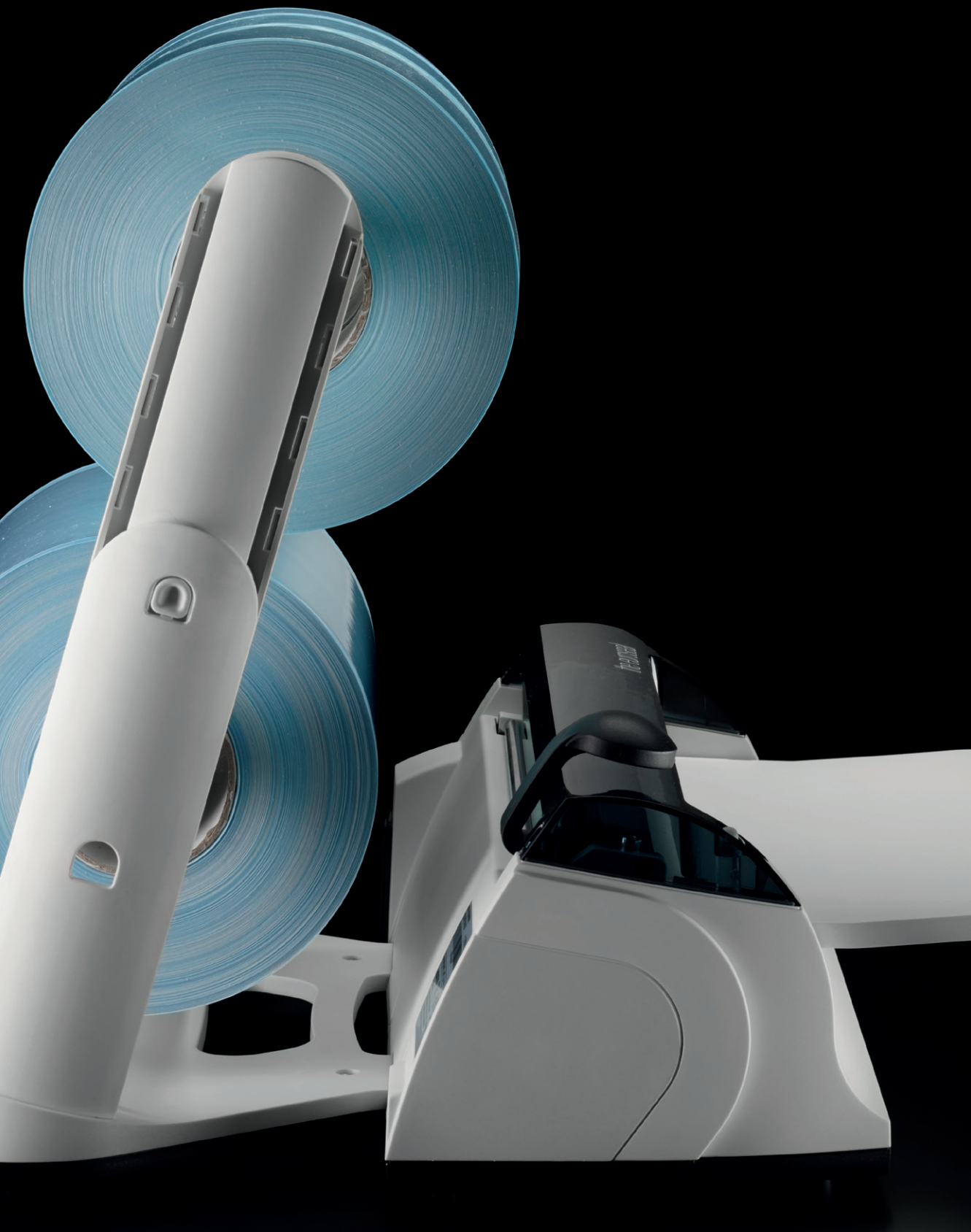

Euroseal®

Революция запечатывания в ваших руках

Термозапечатывающее устройство Euroseal®- компактное, эргономичное и простое в использовании. Прозрачная крышка из поликарбоната позволяет осуществлять процедуру запечатывания с большей точностью. Специальный запатентованный держатель рулонов регулируется по высоте и глубине, а также, при необходимости, закрепляется на стене, оптимизируя пространство.

**Полоса апечатывания:**

12 x 310 мм

**Габариты (шхвхг):**

-Стандарт: 456 x 315 x 390 мм

-С настенным держателем
рулонов: 456 x 200 x 300 мм

-С двойным держателем
рулонов: 456 x 420 x 390 мм

**Вес:**

7,1 кг

**Напряжение питания:**

200-240 В | 50/60 Гц

**Потребляемая
мощность:**

100 Вт

Интегрированная опорная поверхность способствует комфорту и практичности в работе. Система блокировки обратного хода и система безопасности, позволяющая избежать сгорания рулонов, а также ряд звуковых и визуальных сигналов для помощи в работе. Полностью соответствует стандартам EN 868-5 и EN 11607-2.





Универсальность

Запатентованный регулируемый держатель рулонов. Может быть закреплён на стене для оптимизации пространства.



Надежность

Система блокировки обратного хода и система предотвращения сгорания рулонов, а также ряд звуковых и визуальных сигналов.



Практичность

Просторная опорная поверхность обеспечивает легкое, практичное и комфортное использование.



Прочность

Современные легкие материалы, устойчивые к наиболее интенсивному использованию.




Простота

Прозрачная крышка из поликарбоната позволяет проследить за рулоном до области запечатывания.




Эргономичность

Каждая деталь разработана для улучшения качества работы операторов.

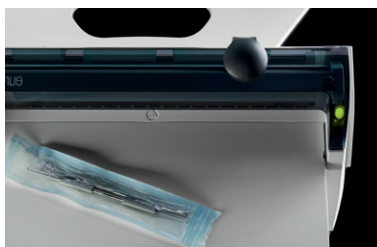

Практичная опорная поверхность, позволяющая упростить и ускорить рабочий процесс

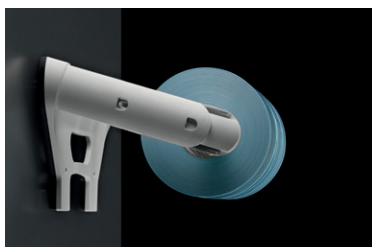


Настенный держатель рулонов, способствующий оптимизации пространства

www.stomshop.pro

Euroseal® Infinity

Одно термозапечатавающее устройство навсегда

Электронное термозапечатающее устройство с непрерывным циклом и постоянной температурой. Euroseal® Infinity - это естественная эволюция Euroseal® 2001 Plus, от которого Euroseal® Infinity берет и развивает свои самые сильные стороны. Прочность, надежность, простота в использовании, а также привлекательный функциональный дизайн. Новое встроенное режущее устройство и фронтальный сварочный рычаг не только улучшают эргономику и безопасность, но и облегчают операции упаковки и запечатывания.

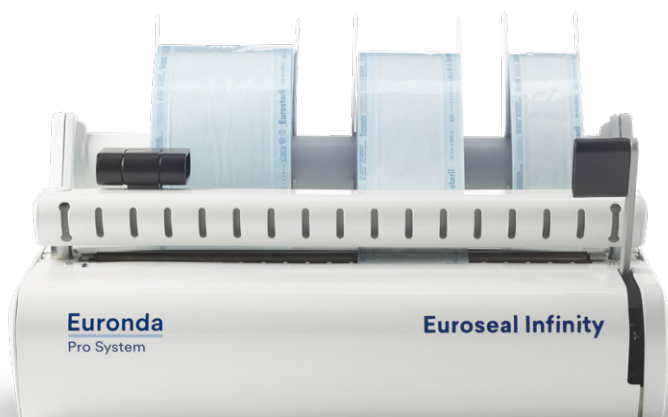

Полоса апечатывания:

12 x 310 мм



Габариты (шхвхг):

430x215x382 мм



Вес:

7.1 кг




Напряжение питания:

200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

100 Вт

Благодаря этому решению размеры машины вполне скромные и позволяют легко разместить ее на столе, а также закрепить вертикально на стене. Euroseal® Infinity имеет металлический стержень, который удерживает и фиксирует рулон и гарантирует, что он остается внутри зоны запечатывания. Гладкие поверхности упрощают его чистку. Полностью соответствует стандартам EN 868-5 и EN 11607-2.

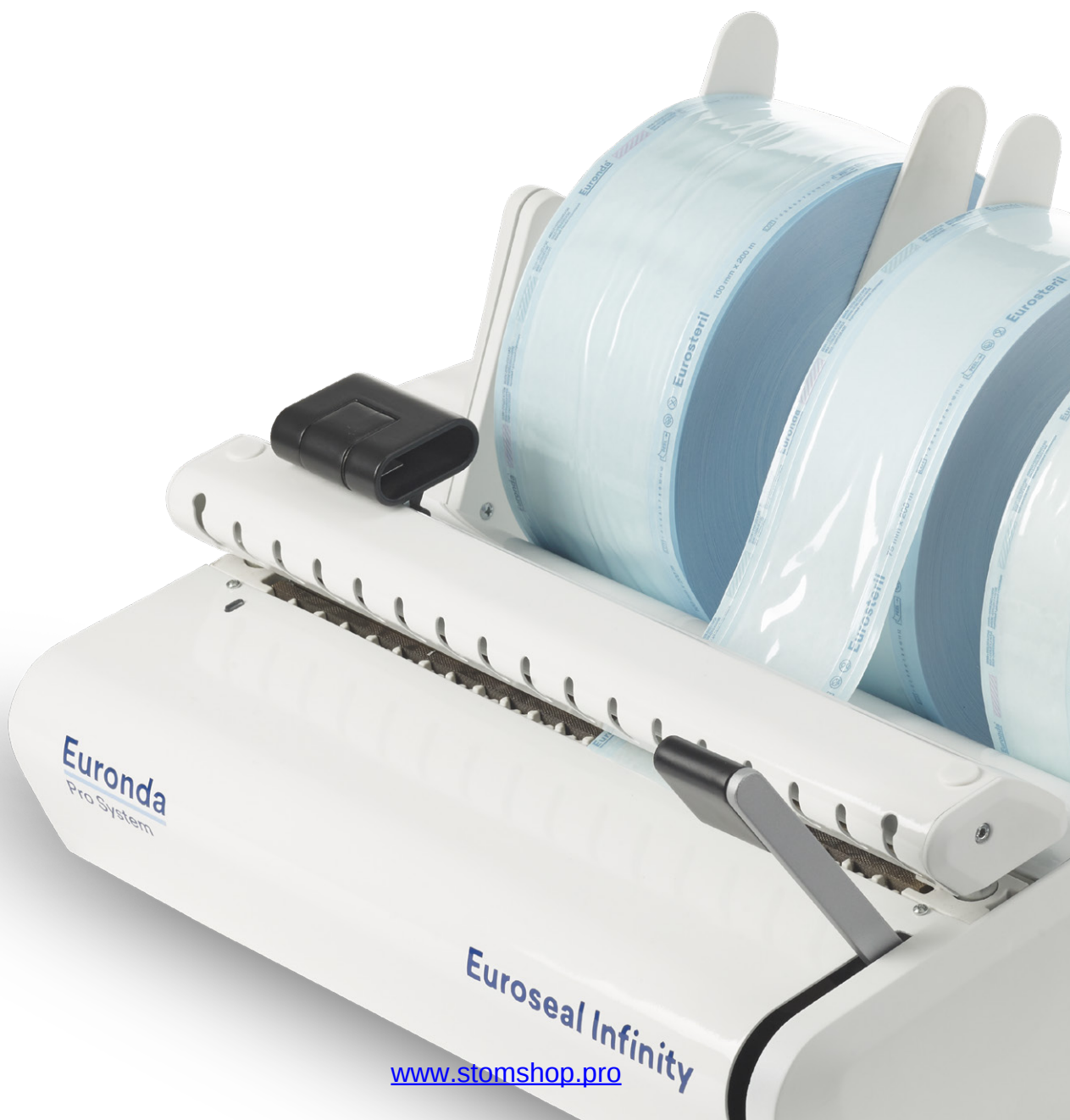



Прочность

Качество материалов и надежная конструкция делают Euroseal® Infinity практически неразрушимым термозапечатывающим устройством.



Универсальность

Держатель рулона может быть установлен в двух положениях: верхнее - для лучшей производительности, когда машина закреплена на стене, или нижнее - для ускорения процесса выбора рулона и его замены.



Эргономичность

Встроенное режущее устройство и фронтальный сварочный рычаг облегчают операции упаковки.



Компактность

Скромные размеры машины позволяют легко разместить ее на столе, а также закрепить на стене.



Безопасность

Стержень для фиксации рулона, который всегда удерживает рулон внутри поля сварки.




Надежность

Позволяет выполнять все операции с легкостью и без ошибок.



Новое встроенное режущее устройство, эффективное и простое в замене

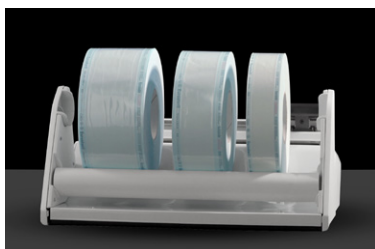

Альтернативное решение для держателя рулонов, облегчающее их выбор и замену.


www.stomshop.pro

Технические характеристики

Euromatic®

Габариты (шхвхг)	510x215x242 мм	Полоса запечатывания	12.5 мм
		Температура запечатывания	160-220°C
		Напряжение питания	200-240 В 50/60 Гц
		Потребляемая мощность	600 Вт
Вес	14 кг	Дисплей	2.8 - дюймовый цветной сенсорный экран

Euroseal® Valida

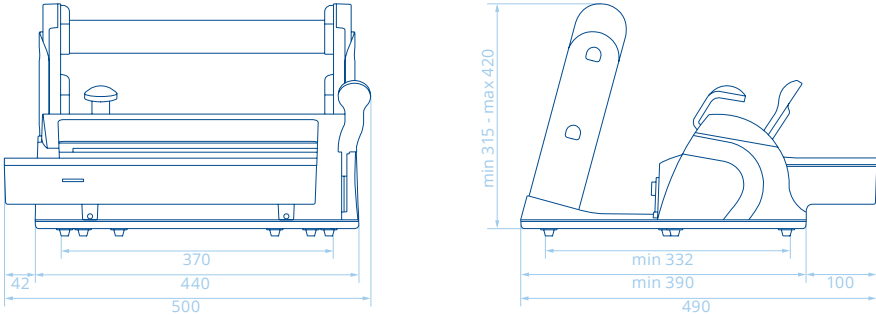			
Габариты (шхвхг)	Стандарт: 500 x 315 x 490 мм С настенным держателем рулонов: 500 x 200 x 490 мм С двойным держателем рулонов: 500 x 420 x 490 мм	Полоса запечатывания	12x310 мм
		Температура запечатывания	170-190°C
		Напряжение питания	200-240 В 50/60 Гц
		Потребляемая мощность	100 Вт
Вес	8.3 кг	Дисплей	4 - дюймовый цветной сенсорный экран

Соответствие запечатывания нормам

- EN 868-5
- EN 11607-2

Сертификаты

- Компания: ISO 13485
ISO 9001


Соответствие нормам Euromatic®

- Директива по машинному оборудованию 2006/42/CE
Применяемые стандарты: EN 12100, EN 13857, EN 60204-1
- Директива 2014/30/EU
Применяемые стандарты: EN 61326
- Директива низкого напряжения 2014/35/EU
Применяемые стандарты: EN 60204-1


Соответствие нормам Euroseal® Valida, Euroseal® и Euroseal® Infinity

- Директива 2014/30/EU
Применяемые стандарты: EN 61326
- Директива низкого напряжения 2014/35/EU
Применяемые стандарты: EN 61010-1

Euroseal®

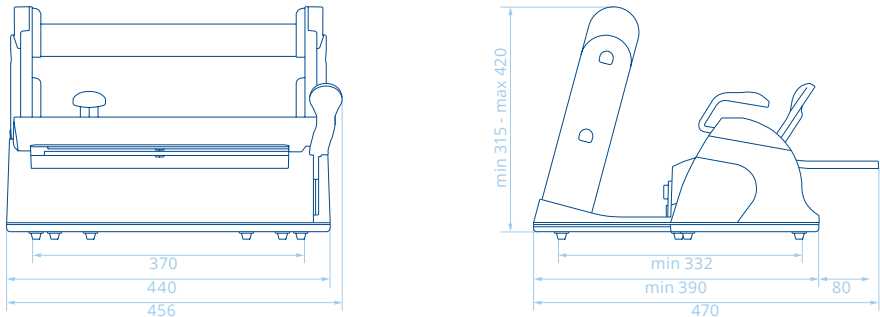		
Габариты (шхвхг)	Стандарт: 456 x 315 x 390 мм С настенным держателем рулонов: 456 x 200 x 300 мм С двойным держателем рулонов: 456 x 420 x 390 мм	
	Вес	7.1 кг
	Полоса запечатывания	12x310 мм
	Температура запечатывания	170-200°C
	Напряжение питания	200-240 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность		100 Вт

Euroseal® Infinity

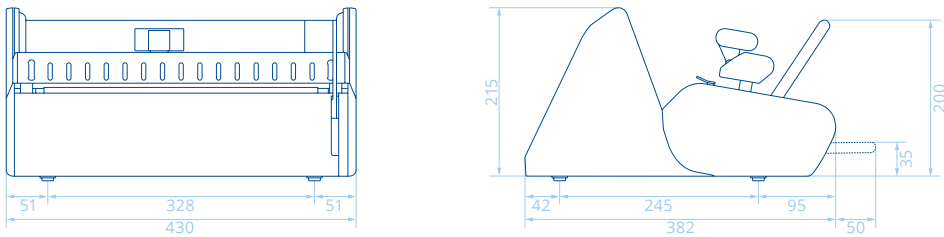		
Габариты (шхвхг)	430x215x430 мм	
	Вес	7.1 кг
	Полоса запечатывания	12x310 мм
	Температура запечатывания	170-200°C
	Напряжение питания	200-240 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность		100 Вт

Медицинская упаковка



Eurosteril®

Рулоны для Стерилизации



Рулоны для стерилизации Eurosteril® изготовлены из лучших сертифицированных материалов: медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м² и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Это гарантирует прочность, простоту и надежность при вскрытии- не оставляют волокна ткани и частички пластика. Поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих условиях хранения. Рулоны снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности после процедуры автоклавации, для максимальной безопасности пациентов. Изготовлены в полном соответствии с директивой 93/42/ЕЕС (и последующим изменением 2007/47/СЕ) и нормой EN 868-5.

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

S 6 месяцев стерильности с даты изготовления при надлежащих условиях хранения и при условии подтверждения процесса стерилизации и запечатывания



Классификация:

Медицинское Изделие
Класс I



Комплектация:

5 см x 200 м
(в упаковке 8 рулонов)

7.5 см x 200 м
(в упаковке 5 рулонов)

10 см x 200 м
(в упаковке 4 рулона)

15 см x 200 м
(в упаковке 2 рулона)

20 см x 200 м
(в упаковке 2 рулона)

25 см x 200 м
(в упаковке 1 рулон)

30 см x 200 м
(в упаковке 1 рулон)

40 см x 200 м
(в упаковке 1 рулон)

Mix Eurosteril®

Практичный Mix Рулонов для стерилизации. Изготовлены из белой медицинской бумаги с высокой плотностью (60 г/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена, поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих условиях хранения. Химические цветные индикаторы подтверждают процесс стерилизации.

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

S 6 месяцев стерильности с даты изготовления при надлежащих условиях хранения и при условии подтверждения процесса стерилизации и запечатывания



Mix включает:

2 рулона 5 см
2 рулона 7.5 см
1 рулон 10 см



Комплектация:

Упаковка - 1 Mix

www.stomshop.pro

Eurosteril® Рулоны для Стерилизации со Складками

Изготовлены из медицинской бумаги с высокой плотностью (60 г/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена, поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих условиях хранения.

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

S 6 месяцев стерильности с даты изготовления при надлежащих условиях хранения и при условии подтверждения процесса стерилизации и запечатывания



Классификация:

Медицинское Изделие
Класс I



Комплектация:

20 см x 5 см x 100 м
(В упаковке 2 рулона)

25 см x 5 см x 100 м
(В упаковке 1 рулон)

25 см x 6,5 см x 100 м
(В упаковке 1 рулон)

Euroseal® Check

Контрольный тест для термозапечатывателей со спаиваемой полоской, позволяющий проконтролировать корректное запечатывание рулонов, соответствует EN 11607-2.



Комплектация:

Упаковка: 100 тестов
Транспортная коробка:
40 упаковок

Eurosteril® Пакеты для Стерилизации



Пакеты для стерилизации Eurosteril® изготовлены из лучших сертифицированных материалов: медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м² и двойного слоя ламинированной голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Это гарантирует прочность, простоту и надежность при вскрытии - не оставляют волокна ткани и частички пластика. Поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих условиях хранения. Снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности после процедуры автоклавации, для максимальной безопасности пациентов. Изготовлены в полном соответствии с директивой 93/42/EEC (и последующим изменением 2007/47/CE) и нормой EN 868-5.

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

S 6 месяцев стерильности с даты изготовления при надлежащих условиях хранения и при условии подтверждения процесса стерилизации и запечатывания



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс I



Комплектация:
5 x 25 см
(в коробке 500 штук)
7,5 x 25 см
(в коробке 500 штук)
10 x 25 см
(в коробке 500 штук)

Eurosteril® Пакеты для Стерилизации Самоклеящиеся



Изготовлены из белой Медицинской бумаги с высокой плотностью (60 г/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности после процедуры автоклавации для максимальной безопасности пациентов. Это гарантирует прочность, простоту и надежность при вскрытии - не оставляют волокна ткани и частички пластика. Изготовлены с применением самых передовых технологий из лучших сертифицированных материалов в полном соответствии с директивой 93/42/EEC (и последующим изменением 2007/47/CE) и нормой EN 868-5.

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

S 6 месяцев стерильности с даты изготовления при надлежащих условиях хранения и при условии подтверждения процесса стерилизации и запечатывания



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс I



Комплектация:
9 x 25 см
(Упаковка – 200 штук,
коробка – 9 упаковок)
14 x 26 см
(Упаковка – 200 штук,
коробка – 6 упаковок)
19 x 33 см
(Упаковка – 200 штук,
коробка – 5 упаковок)

Euronda Spa® 2019

Не разрешается копирование, сканирование и воспроизведение никаким устройством данного каталога. Все права защищены. Изображения, описания, цитаты, размеры или технические характеристики должны рассматриваться как ориентировочные. Сохраняя базовые характеристики продукта, производитель оставляет за собой право вносить модификации в любой момент с целью улучшения.

www.stomshop.pro

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111
f (+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.com

Deutschland

Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t (+49) 2505 9389 0
f (+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
f + 33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

España

Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo de Torres 4
30007 Murcia, España
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg, Russia
t + 7 (812) 635 88 94
m info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru

Euronda®